

MUNDBIND

SÅDAN SKAL DE ANVENDES

ANVENDELSE




Vask eller brug håndsprit på dine hænder, før du rører masken.



Tjek masken for slitage og huller.



Find oversiden på masken (der hvor den formbare næseklemme sidder).

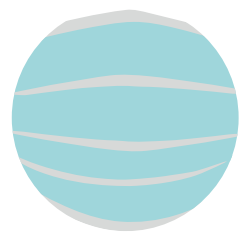

Sørg for at den farvede side vender udad.



Placer masken hen over næsen, og tilpas den formbare klemme til næse og kinder.



Mundbindet skal dække mund, næse og hage.



Juster masken så den passer til dit ansigt, uden at efterlade åbninger langs siderne.



Rør **ikke** ved mundbindet! Skift mundbind ofte, og altid hvis det er vådt eller beskidt.

AFSKAFFELSE



Rør kun elastikkerne. Fjern mundbindet ved at tage fat i elastikkerne uden at røre selve mundbindet.



Smid det brugte mundbind ud med det samme.



Engangsmundbind må **aldrig** genbruges.



Vask eller brug håndsprit på dine hænder, når du har bortskaffet mundbindet.